

Guia de Instalação

Biblioteca Digital
Microplant



Descrição das pastas Exocad®




- Microplant_Cm_BI
- Microplant_Cm_Cx
- Microplant_Cm_Neo
- Microplant_Cm_Ssw
- Microplant_Gm
- Microplant_He
- Microplant_Hi
- Microplant_Mu
- Microplant_Pilar_Preparo

Instalação Exocad®

Instalação Exocad®

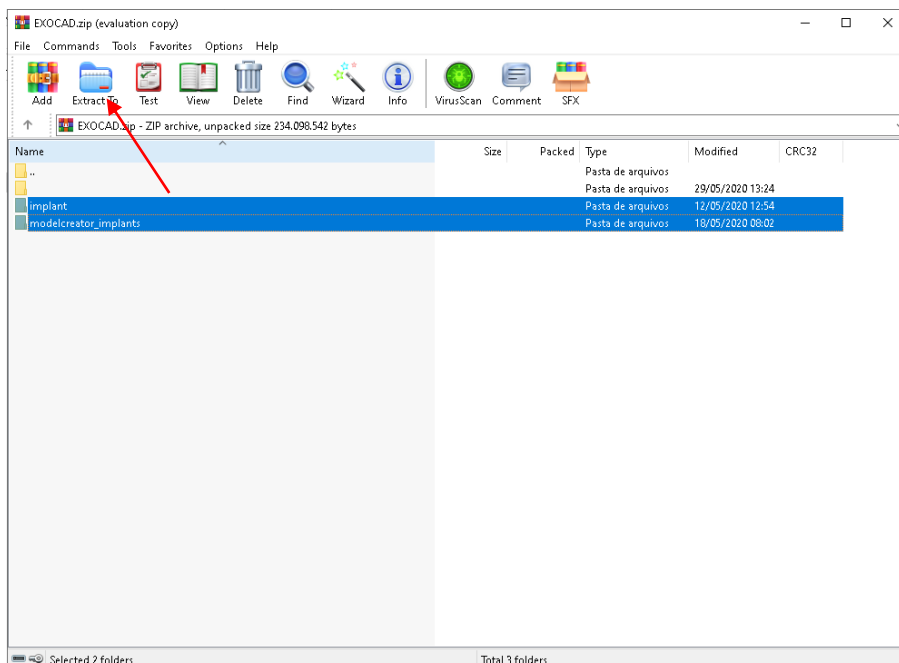


1 Antes de iniciar a instalação Exocad® será necessário descompactar o arquivo zip



1. Abra o arquivo zip
2. Selecione as pastas que serão descompactada
3. Clique me extrair arquivo
4. Selecione a pasta que deseja descompactar

Insatalação exocad®

1 localize a pasta do exocad®


 exocad-DentalCAD-64bit-2016-10-19	22/12/2019 06:31
 exocad-DentalCAD-64Bit-2019-12-17	17/12/2019 07:17
 exocad-DentalCAD-64Bit-2019-12-17-demo	17/12/2019 07:17

Existem diferentes versões do software, como nos exemplos acima.
Os locais de instalação em todas as versões são os mesmos

Onde colocar a biblioteca Exocad®

Biblioteca Implant

Copie todas as pastas que estão dentro da pasta implant

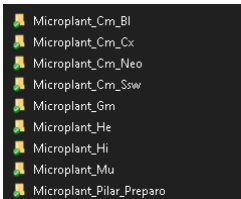

Caminho até a pasta de destino

- 1 – exocad-DentalCAD-64Bit-2019-12-17-demo (Pasta principal Exocad)
- 2 – DentalCADApp
- 3 – library
- 4 – implant (cole todas as pasta copiadas)

Onde colocar a biblioteca Exocad®

Biblioteca Model Creator

Copie a pasta Microplant_Analogs

Caminho até a pasta de destino


- 1 – exocad-DentalCAD-64Bit-2019-12-17-demo (Pasta principal Exocad®)
- 2 – DentalCADApp
- 3 – library
- 4 – modelcreator
- 5 – implants (cole todas as pasta copiadas)



Onde colocar a biblioteca Exocad® (AmannGirrbach)

Biblioteca Implant

Copie todas as pastas da biblioteca implant

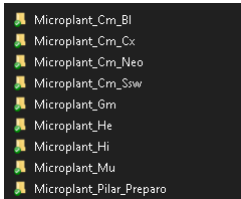

Caminho até a pasta de destino

- 1 – C:\Program Files
- 2 – Ceramill Software
- 3 – CAD
- 4 – library
- 5 – implant (cole todas as pasta copiadas)

Onde colocar a biblioteca Exocad® (AmannGirrbach)

Biblioteca Model Creator

Copie a pasta Microplant_Analogs


Caminho até a pasta de destino

- 1 - C:\Program Files
- 2 - Ceramill Software
- 3 - CAD
- 4 - library
- 5 - modelcreator
- 6 - implants (cole todas as pasta copiadas)



Instalação 3Shape®

1 Antes de iniciar a instalação 3Shape® será necessário descompactar o arquivo zip

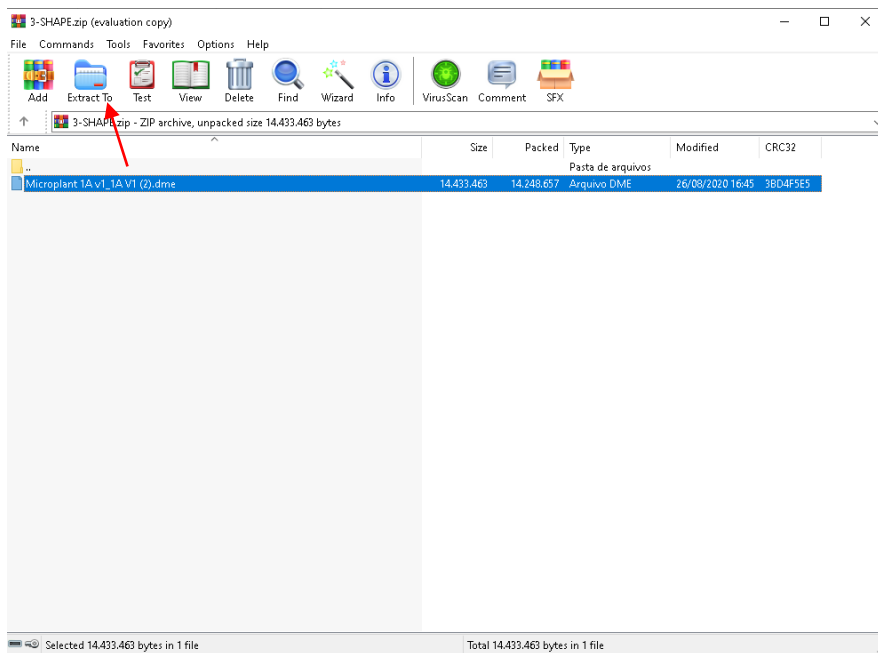

1. Abra o arquivo zip
2. Selecione as pastas que serão descompactada
3. Clique me extrair arquivo
4. Selecione a pasta que deseja descompactar

Instalação 3Shape®

- Abra o painel de controles 3Shape®



Dental System 2019-1 x64 (Build: 88.0.10 - 190621)
Copyright 2000-2020 UDI: (01)05902729752794(11)190621(10)88.0.10

3shape 

Click em “Importar/Exportar”


Dental System Control Panel

Página Inicial Voltar Salvar Ajuda

Página Principal

- Configurações do Sistema**
 - Configurações do Sistema
 - Opções de projetos
 - Serviços
 - Fluxo de trabalho automático
- Dental Manager™**
 - Geral
 - Caixa de Entrada da Fabricação
 - ERP e o tempo do processo
 - Importar pedido
 - Dias úteis
 - Aplicativos de terceiros
 - Fresadoras
- Configurações do Local**
 - Este local
 - Dentistas
 - Laboratórios
 - Fabricantes
 - Operadores
 - Países
 - Processos de fabricação
- Ferramentas**
 - Gerenciamento de assinatura (dongle)
 - Importar/Exportar
 - Centro de Download
 - Centro de treinamento
 - 3Shape Communicate®

- Elementos básicos**
 - Materiais
 - Cores
 - Linha marginal
 - Attachments
 - Overlays do projeto em 2D
 - Blocos CAD
- Elementos da Anatomia**
 - Biblioteca ScanIt
 - Bibliotecas de Anatomia e pântico
 - Bibliotecas de sorrisos
 - Dentes artificiais
 - Coroas
 - Pânticos da Coroa
 - Inlays
 - Onlays/Facetas
 - Coroas Provisórias
 - Pânticos Provisórios
 - Provisórios no modelo preparado
 - Facetas Oclusais
- Elementos da estrutura**
 - Copings
 - Estruturas dos Pânticos
 - Enceramentos
 - Coroas telescópicas primárias
- Pilares**
 - Bibliotecas de coping
 - Sistemas de implante
- Núcleo Intra-radicular**
 - Sistemas de núcleo intra-radicular
 - Núcleos Intra-radiculares
- Elementos da ponte**
 - Barras
 - Conectores
- Próteses totais**
 - Configurações do projeto
 - Gengiva
 - Quadro das bibliotecas do Smile
- Removíveis**
 - Estruturas
 - Conectores e Apoios
 - Tiras do perfil da cera
 - Retenções
 - Ceras rugosas
- Modelo digital**
 - Projeto modelo digital
 - Interfaces do articulador
- Aparelhos**
 - Painel de Controle do sistema ortodôntico
 - Guia de posicionamento

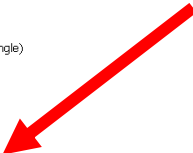

Click em importar materiais

Dental System Control Panel - Exportar/Importar Materiais

Página Inicial Voltar Salvar Ajuda

Ferramentas ▶ Importar/Exportar

Tarefas

- Exportar materiais
- Importar materiais

Importar materiais

Para importar os novos materiais, clique em "Importar materiais" e procure o arquivo desejado (extensão ".dme"). Depois seleccione os materiais da lista exibida na tela e clique em "Importar". Em geral recomenda-se seleccionar tudo. Poderá também baixar os materiais diretamente do FTP - avance para Configurações Locais -> Página dos locais e clique em "Baixar Materiais".

Importar materiais


Histórico dos materiais importados

Exportar materiais


Clonar sistema

Click Importar e então aguarde finalizar


Importar e atualizar materiais

Selecione materiais para importar: 

<input checked="" type="checkbox"/> Materiais disponíveis	Nome da biblioteca
> <input checked="" type="checkbox"/> Materiais	Microplant 1A v1
> <input checked="" type="checkbox"/> Sistemas de implante	Fornecedor
	Microplant
	Tipo de biblioteca
	Biblioteca de implantes
	Versão
	1A V1
	Data de criação da biblioteca
	09/06/2020
	Descrição
	Desenvolvida por Fabio Costa



Click no canto superior direito para fechar

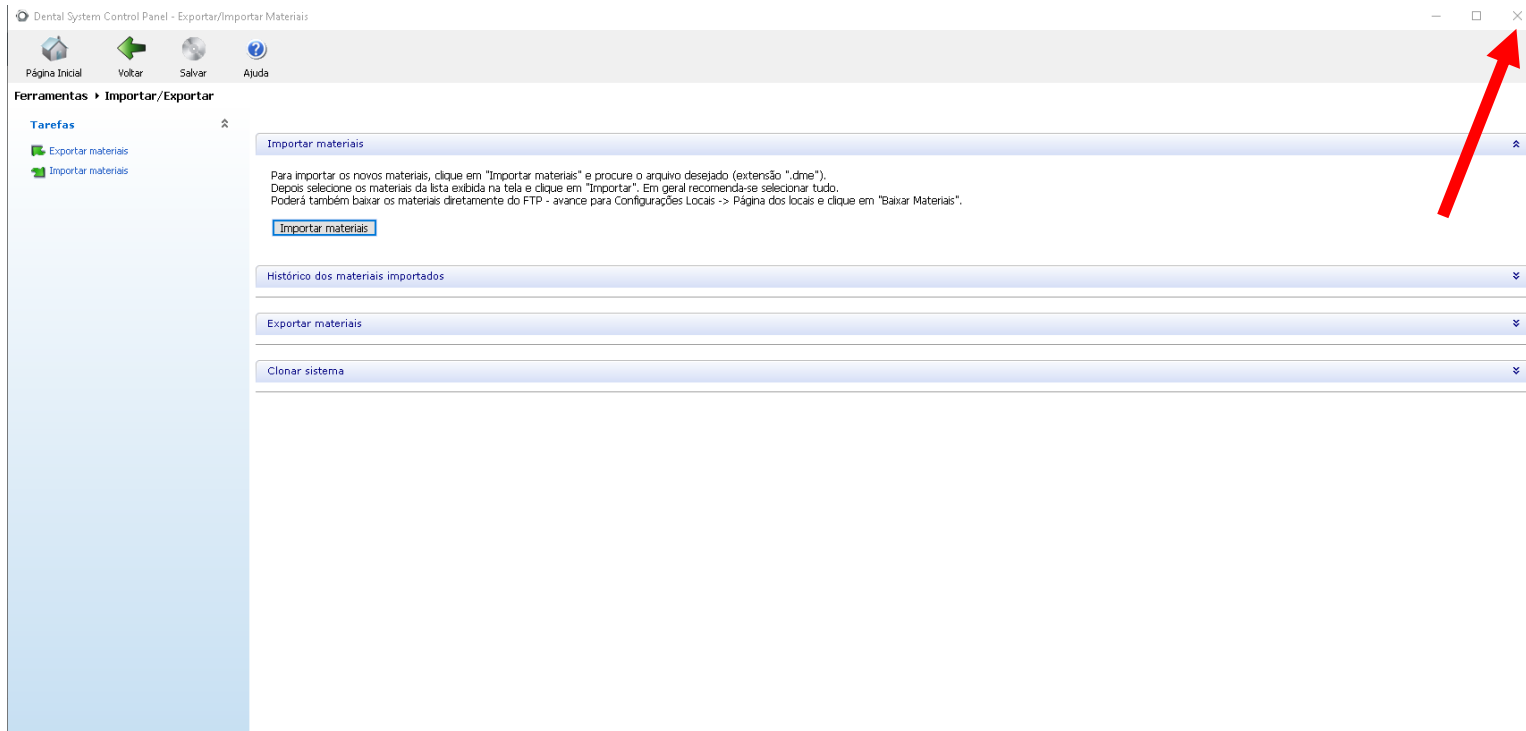

Dental System Control Panel - Exportar/Importar Materiais

Página Inicial Voltar Salvar Ajuda

Ferramentas > Importar/Exportar

Tarefas

- Exportar materiais
- Importar materiais

Importar materiais

Para importar os novos materiais, clique em "Importar materiais" e procure o arquivo desejado (extensão ".dme"). Depois selecione os materiais da lista exibida na tela e clique em "Importar". Em geral recomenda-se selecionar tudo. Poderá também baixar os materiais diretamente do FTP - avance para Configurações Locais -> Página dos locais e clique em "Baixar Materiais".

Importar materiais

Histórico dos materiais importados

Exportar materiais

Clonar sistema

Confirmar salvar



Confirmar salvar

Salvar as alterações antes de fechar?

Sim

Não

Cancelar

Instalação Dental Wings®

Peça para o cliente abrir o programa





Click em
configurações

OPEN RECENT CASE

- 1. COM-200612-12
- 2. COM-200612-13
- 3. COM-200612-11
- 4. COM-200611-16
- 5. COM-200609-8
- 6. COM-200611-14
- 7. COM-200612-9
- 8. COM-200612-8
- 9. COM-200612-7
- 10. COM-200612-5
- 11. COM-200611-11
- 12. COM-200611-4
- 13. COM-200611-3
- 14. COM-200611-2
- 15. COM-200611-9
- 16. COM-200611-15
- 17. COM-200611-17
- 18. COM-200611-18
- 19. COM-200612-1
- 20. COM-200612-4

NOTIFICATIONS

- DWOS 9.2 Update**
DWOS 9.2 introduces integration with 3Shape TRIOS®, as well ...
18 de Maio de 2020
- Download library**
▲ A rich assortment of resources is available on the Downloads...
15 de Abril de 2020
- DWOS - New training videos**
▲ Discover the new training videos available on dentalwings.co...
15 de Abril de 2020
- TWO-MONTH FREE HOME OFFICE DWOS LICENSE**
With COVID-19 rapid developments affecting people and countri...
26 de Março de 2020
- DWOS 9.1.5 Update**
DWOS 9.1.5 includes bug fixes and other improvements. Update...
21 de Fevereiro de 2020



OPEN RECENT CASE

- 1. COM-200612-12
- 2. COM-200612-13
- 3. COM-200612-11
- 4. COM-200611-16
- 5. COM-200609-6
- 6. COM-200611-14
- 7. COM-200612-9
- 8. COM-200612-8
- 9. COM-200612-7
- 10. COM-200612-5
- 11. COM-200611-11
- 12. COM-200611-4
- 13. COM-200611-3
- 14. COM-200611-2
- 15. COM-200611-9
- 16. COM-200611-15
- 17. COM-200611-17
- 18. COM-200611-18
- 19. COM-200612-1
- 20. COM-200612-4



- Material Management
- Dentist Management
- Dentist Preferences
- Attachment Kits
- Implant Kits
- Anatomy Kits
- Bar Profile Editor
- User Management
- Open machine software
- Scanner Calibration

Click em
Implant Kits

DWOS

NOTIFICATIONS

DWOS 9.2 Update

DWOS 9.2 introduces integration with 3Shape TRIOS®, as well ...
18 de Maio de 2020

Download library

A rich assortment of resources is available on the Downloads...
15 de Abril de 2020

DWOS - New training videos

Discover the new training videos available on dentalwings.co...
15 de Abril de 2020

TWO-MONTH FREE HOME OFFICE DWOS LICENSE

With COVID-19 rapid developments affecting people and countri...
26 de Março de 2020

DWOS 9.1.5 Update

DWOS 9.1.5 includes bug fixes and other improvements. Update...
21 de Fevereiro de 2020

10:55

15/06/2020

Refresh

Auto


[About Straumann CARES Visual](#)

Inspector



Implant Kit Editor

- Implant Kits
 - MICROPLANT
 - Neodent
 - Straumann

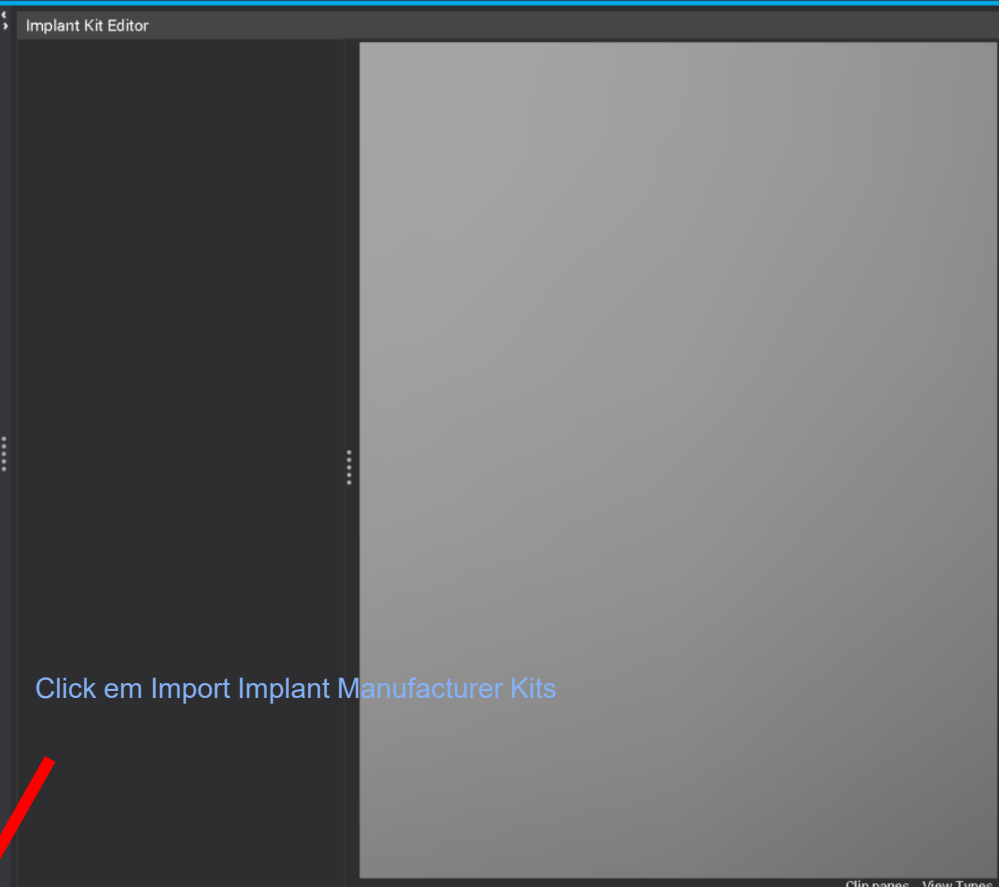

Click em +

Click em Import Implant Manufacturer Kits



- + - ▾
- New manufacturer
- Import Implant Kit
- Import Implant Manufacturer Kits

Refresh Auto

Inspector

Clip panes View Types

Selecione o arquivo .zip enviado no link abaixo


Importante: Não é necessário descompactar o arquivo zip Dental Wings®

BIBLIOTECA DENTAL WINGS PARA INSTALAÇÃO -

<https://www.dropbox.com/s/z9bj2atptpb6wz/MICROPLANT%20DW.zip?dl=0>



Aguarde a mensagem e a biblioteca estará importada

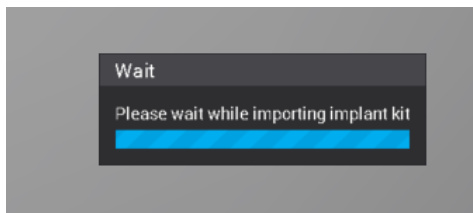

OBRIGADO!

Você tem alguma pergunta?

comercial@microplant.com.br

☎ (11) 2990-5533

www.microplant.com.br/



SOLUÇÕES INTELIGENTES



@MicroplantSistemadeProteses



@microplant.sistemasproteses



@Microplant

