



Componentes Protéticos para Implantes Dentários - NÃO ESTÉREIS

Base Metálica CoCr Microplant

Base Metálica CoCr Microplant

INSTRUÇÕES DE USO

Produto/Marca

Base Metalica CoCr / WMA / Microplant

Família de Produtos

As Bases Metálicas CoCr podem ser:

- Hexágono Externo /Interno /Cone Morse
- Com anti-rotacional (indexação) ou rotacional (lisa)

DESCRIÇÃO

As Bases Metálicas CoCr, bem como as calcináveis são elementos que se conectam aos implantes ou a um pilar intermediário. São destinados a sobre fundição de elementos protéticos unitários (anti-rotacional) ou múltiplos (rotacional).

A escolha do uso dos Bases Metálicas CoCr vai da experiência e habilidade do profissional.

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

As Bases Metálicas CoCr são utilizadas no intuito de produzir uma infraestrutura metálica, através do processo de sobre fundição, com uma temperatura de 900/950°C para receber a aplicação de material restaurador, seja resinoso ou porcelana.

As luvas plásticas com base metálica cobalto cromo quando indicadas serão enviadas ao técnico em prótese dentária e o mesmo irá encerrar e fundir a(s) coroa(s) unitárias ou múltiplas e/ou barra(s) de protocolos ou overdentures.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

As Bases Metálicas CoCr são comercializadas não estéreis. Os materiais de uso em conjunto com as Bases Metálicas, como chaves e parafusos deverão ser esterilizados em autoclaves devidamente calibradas e controladas periodicamente.

Para a instalação da Bases Metálicas CoCr é recomendado que o profissional tenha conhecimento da especialidade e que elabore um plano de tratamento prévio, identificando assim, o implante e seus diâmetros.

As Bases Metálicas devem ser armazenadas em local fresco e arejado.

A esterilização deste produto se faz necessária e é de responsabilidade única e exclusiva do profissional. Para evitar quaisquer alterações dimensionais, este produto não deve ser utilizado quando a embalagem estiver violada.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

As Bases Metálicas CoCr, para implantes HE/HI/CM, nos diâmetros que variam de 3.3 a 6.0 mm. Podem ser direto do implante ou sobre os pilares.

IMAGEM DO PRODUTO

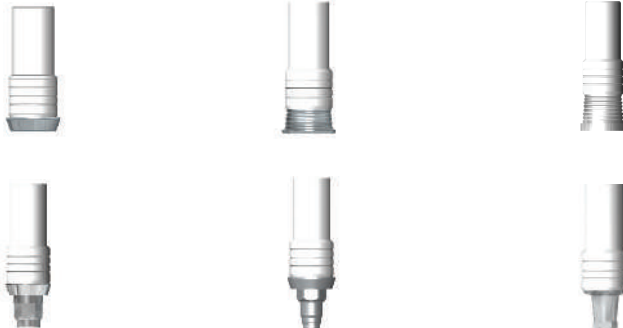



TABELA DE CÓDIGO DAS FAMÍLIAS DO PRODUTO

A família deste produto pode ser identificada através dos dois primeiros dígitos do código do produto que serão:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22XX10XXX	Bases Metálicas CoCr Rotacional
22XX20XXX	Bases Metálicas CoCr Anti-Rotacional

REF Código do REF

LOT Número do Lote

 Ler as Instruções

 Data de Fabricação

 Produto de Uso Único

 Evitar Exposição à Luz Solar



Manter Protegido de Produto Umidade



Cuidado - Frágil



Não Utilizar se Embalagem estiver violada!



Não Estéril



Prazo de Validade

WMA Microusinagem Médica e Odontológica Ltda
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 452 - CEP 02306-0001
São Paulo-SP - Brasil

Tels.: 55 11 2990.5533

www.microplant.com.br

microplant@microplant.com.br

Responsáveis Técnicos: Dr. Geraldo Paglia Jr - CRO 29379

Eng. Welmer Marçal Antunes - CREA 5062491951

