



# Componentes Protéticos para Implantes Dentários - NÃO ESTÉREIS

Cicatrizadores Microplant

## Cicatrizadores Microplant

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Produto/Marca

Cicatrizadores / WMA / Microplant

#### Família de Produtos

Os Cicatrizadores podem ser:

- Com perfil emergente
- Sem perfil emergente (reto)

### DESCRIÇÃO

Peça única, fabricado em Titânio ASTM F136, parafusada sobre os implantes de Hexágono externo (HE), Hexágono Interno (HI) e Cone morse (CM) respectivamente. Geralmente aplicada no segundo tempo cirúrgico entre a abertura do implante e a colocação da prótese.

### INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

São indicados para uso após a abertura dos implantes com o intuito de promover conformação cicatricial do tecido mole.

Esse produto se destina a condicionar os tecidos (conjuntivo e epitelial) com o mesmo diâmetro ou similar ao dente à qual o implante está substituindo, indicando ou não, presença da emergência e sua inclinação.

Os Cicatrizadores Microplant, são compatíveis com os implantes nacionais e importados de diâmetros que vão de 2,9 a 6,5mm, respeitando as características dos implantes para garantir a compatibilidade, sendo assim o Cicatrizador independe da marca e sim de suas características mecânicas para encaixe.

A Microplant disponibiliza uma tabela de compatibilidade em seus catálogos, em casos de dúvida certifique-se antes de adquirir o produto.

No segundo tempo cirúrgico após expor o parafuso de cobertura dos implantes, remova o mesmo e imediatamente coloque um cicatrizador rosqueando sobre o implante usando uma chave hexagonal de 1.2 mm.

Está atento na altura deste componente para que o mesmo esteja emergindo do tecido mole.

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

Para a colocação destes cicatrizadores é recomendado que o profissional tenha conhecimento da especialidade e que elabore um plano de tratamento prévio, para diagnosticar o diâmetro da plataforma de assentamento do implante, a altura do espaçamento transmucoso, identificando assim, a altura de cinta necessária para seu cicatrizador.

Para instalação dos Cicatrizadores Microplant será necessária a utilização de uma chave protética hexagonal Microplant de 1,2 ou similar disponível no mercado.

**ATENÇÃO,** observar o torque indicado!

A esterilização deste produto se faz necessária e é de responsabilidade única e exclusiva do profissional. Método de esterilização: Ciclos a vapor de (121 ° a 130° C°) por um tempo médio de 30 minutos.


Para evitar quaisquer alterações dimensionais, este produto não deve ser utilizado quando a embalagem estiver violada.

Os Cicatrizadores devem ser armazenados em local fresco e arejado.

### FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os Cicatrizadores para implantes HE/HI ou Cone Morse nos diâmetros que variam de 2.9 a 6.5 mm com a presença ou não de emergência, conforme imagens ilustrativas abaixo.

## IMAGEM DO PRODUTO

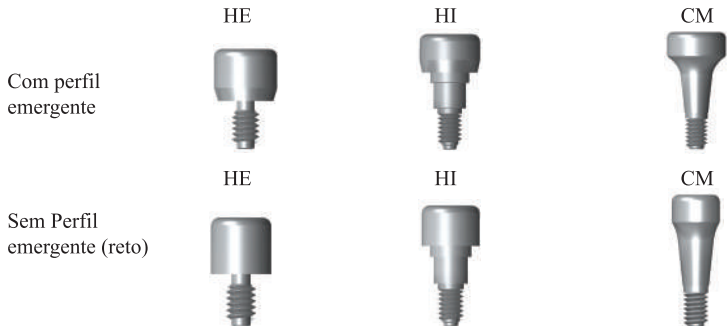

## TABELA DE CÓDIGO DAS FAMÍLIAS DO PRODUTO

A família deste produto pode ser identificada através dos dois primeiros dígitos do código do produto que serão:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
30XX10XXX	Cicatrizadores sem emergência
35XX10XXX	Cicatrizadores com emergência

**[REF]** Código do REF

**[LOT]** Número do Lote

**[!]** Ler as Instruções

**[Z]** Data de Fabricação

**[1]** Produto de Uso Único

**[☀]** Evitar Exposição à Luz Solar



Manter Protegido de Produto Umidade



Cuidado - Frágil



Não Utilizar se Embalagem estiver violada!



Não Estéril



Prazo de Validade

WMA Microusinagem Médica e Odontológica Ltda  
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 452 - CEP 02306-0001  
São Paulo-SP - Brasil  
Tels.: 55 11 2990.5533  
[www.microplant.com.br](http://www.microplant.com.br)  
[microplant@microplant.com.br](mailto:microplant@microplant.com.br)  
Responsáveis Técnicos: Dr. Geraldo Paglia Jr - CRO 29379  
Eng. Welmer Marçal Antunes - CREA 5062491951

