



Componentes Protéticos para Implantes Dentários - NÃO ESTÉREIS

Pilar Protético Microplant

Pilar Protético Microplant

INSTRUÇÕES DE USO

Produto/Marca

Pilar Protético / WMA / Microplant

Família de Produtos

Os Pilares Protéticos podem ser:

- Pilar Estheticone / Pilar Micro-Unit / Pilar Cera One / Pilar Standard
- Pilar de Preparo/ Pilar Provisório

DESCRIÇÃO

Pilares Protéticos intermediários fabricados em Titânio ASTM F136 retos ou angulados, com uma variação de angulação de 15° a 30°, com alturas de cintas que variam de 1 a 6mm e plataforma de assentamento nos diâmetros proporcionais aos implantes. Trata-se de um intermediário entre a prótese e o implante.

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

São indicados na confecção de elementos de próteses únicos e/ ou múltiplos como intermediários. O uso é único e exclusivo por profissionais dentistas e/ou protéticos.

Os pilares protéticos ou intermediários, são rosqueados sobre os implantes e devem respeitar a medida do transmucoso. Esteja atento na escolha do seu pilar pois cada um deles tem uma chave própria de rosqueamento.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

Para a colocação destes pilares é recomendado que o profissional tenha conhecimento da especialidade e que elabore um plano de tratamento prévio, para diagnosticar o diâmetro da plataforma de assentamento e a angulação do implante, assim como, a altura do transmucoso, identificando assim, a cinta necessária para seu pilar.

Para instalação dos Pilares Protéticos Microplant serão necessárias as chaves protéticas Microplant hexagonais ou quadradas ou similar disponível no mercado.

ATENÇÃO, Observar a indicação de torque!

A esterilização deste produto se faz necessária e é de responsabilidade única e exclusiva do profissional. Essa condição é necessária se o dentista for trabalhar com o pilar diretamente na boca do paciente.

Método de esterilização: À vapor (121° a 130° C°).

Para evitar quaisquer alterações dimensionais, este produto não deve ser utilizado quando a embalagem estiver violada.

Os Pilares devem ser armazenados em local fresco e arejado.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Pilares para implantes de hexágono externo e interno, nos diâmetros que variam de 3,3 a 6,0mm e alturas de 1,0mm à 6,0mm conforme imagens ilustrativas abaixo.

IMAGEM DO PRODUTO




TABELA DE CÓDIGO DAS FAMÍLIAS DO PRODUTO

A família deste produto pode ser identificada através dos dois primeiros dígitos do código do produto que serão:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
50XX20XXXD	Pilar Estheticone	56XX10XXXD	Pilar Micro-Unit 17°	61XX20XXXD	Pilar de Preparo 15°
51XX20XXXD	Pilar Estheticone 17°	57XX10XXXD	Pilar Micro-Unit 30°	62XX20XXXD	Pilar de Preparo 25°
52XX20XXXD	Pilar Estheticone 30°	59XX10XXXD	Pilar Cera One	65XX20XXXD	Pilar interface
55XX10XXXD	Pilar Micro-Unit	60XX20XXXD	Pilar de Preparo	67XXXXXXD	Pilar Provisório

REF Código do REF

LOT Número do Lote

 Ler as Instruções

 Data de Fabricação

 Produto de Uso Único

 Evitar Exposição à Luz Solar



Manter Protegido de Produto Umidade



Cuidado - Frágil



Não Utilizar se Embalagem estiver violada!



Não Estéril



Prazo de Validade

WMA Microusinagem Médica e Odontológica Ltda
 Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 452 - CEP 02306-0001
 São Paulo-SP - Brasil
 Tels.: 55 11 2990.5533
www.microplant.com.br
microplant@microplant.com.br
 Responsáveis Técnicos: Dr. Geraldo Paglia Jr - CRO 29379
 Eng. Welmer Marçal Antunes - CREA 5062491951

