



Componentes Protéticos para Implantes Dentários - NÃO ESTÉREIS

Tachinhas Microplant

INSTRUÇÕES DE USO

Produto/Marca

Tachinhas / WMA / Microplant

Família de Produtos

Tachinhas (12)

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

Fabricadas em ASTM F136 G5(Titânio), as Tachinhas Microplant são indicadas durante as cirurgias de enxerto ósseo no intuito de estabilizar barreiras e membranas, evitando sua movimentação e por consequência a perda total ou parcial do enxerto.

Outra indicação das Tachinhas Microplant é a manutenção do arcabouço ósseo em espessura e altura conseguido através de enxerto ósseo e mantido através de uma barreira estabilizada através da aplicação de duas ou mais tachinhas.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

As Tachinhas Microplant são comercializadas não estéril, devendo o profissional esterilizá-las. Para utilização das Tachinhas Microplant, será necessário que o profissional tenha adquirido o Kit instrumental Tachinhas Microplant, para garantir a eficácia na instalação. O uso de outros instrumentais pode comprometer a eficiência e eficácia do produto.

A esterilização deste produto se faz necessária e é de responsabilidade única e exclusiva do profissional. Assim como as Tachinhas, os materiais de uso conjunto com as mesmas, tal como aplicadores e martelo, deverão ser esterilizados a vapor com temperaturas de 121° a 130° C em autoclaves com ciclos médios de 20 minutos podendo variar em função do equipamento devidamente auditadas e controladas periodicamente.

Para a colocação destas Tachinhas é recomendado que o profissional tenha conhecimento da especialidade e que elabore um plano de tratamento prévio, identificando assim, a necessidade do uso de membranas nas técnicas de regeneração tecidual guiada.

Para evitar quaisquer alterações dimensionais, este produto não deve ser utilizado quando a embalagem estiver violada.

O Kit Tachinha deve ser armazenado em local fresco e arejado.

UTILIZAÇÃO

Após a esterilização de todo o conjunto do kit Tachinha, colocar o estojo de tachinhas (almofada) em uma base rígida (bancada) para gerar o apoio necessário para sacar a tachinha.



Posicionar o aplicador na posição perpendicular (90°), pressionar o aplicador manualmente e com força moderada até ouvir-se um click, momento em que o aplicador já se trava a Tachinha. Retirar com cuidado, de forma lenta, ainda na posição perpendicular para não tirar a tachinha de posição.

Posicionar na posição do enxerto e com uma leve batida inserir a tachinha de forma a fixar o elemento a qual se objetiva.

ATENÇÃO, pelo fato da Tachinha ter um formato de cone retentivo em sua extremidade, isso faz que se na hora de extrair do estojo de forma bruta, pode tira-la de posição ou até mesma deixar que a mesma saia completamente, perdendo sua esterilidade. E ainda no momento de inserir na região do enxerto escapar e não alcançar o objetivo.

Após a inserção da tachinha no osso, para sacar o aplicador movimentar o aplicador de uma posição qualquer para o lado.




IMAGEM DO PRODUTO



REF Código do REF

LOT Número do Lote

 Ler as Instruções

 Data de Fabricação

 Produto de Uso Único

 Evitar Exposição à Luz Solar



Manter Protegido de Produto Umidade



Cuidado - Frágil



Não Utilizar se Embalagem estiver violada!



Não Estéril



Prazo de Validade

WMA Microusinagem Médica e Odontológica Ltda

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 452 - CEP 02306-0001

São Paulo-SP - Brasil

Tels.: 55 11 2990.5533

www.microplant.com.br

microplant@microplant.com.br

Responsáveis Técnicos: Dr. Geraldo Paglia Jr - CRO 29379

Eng. Welmer Marçal Antunes - CREA 5062491951

