



Componentes Protéticos para Implantes Dentários - NÃO ESTÉREIS

Transferentes Microplant

INSTRUÇÕES DE USO

Produto/Marca

Transferentes / WMA / Microplant

Família de Produtos

Os Transferentes podem ser:

- Moldeira aberta (MA)
- Moldeira fechada (MF)

DESCRIÇÃO

Os Transferentes Moldeira Aberta (MA) e Moldeira Fechada (MF) possuem uma forma de retenção e um parafuso de transpasse que ficará fora da moldagem para componentes MA e dentro dela para componentes MF, transferindo assim, com exatidão a posição do implante para o modelo de trabalho.

A escolha do uso dos Transferentes MA/MF vai da experiência e habilidade do profissional, podendo ser eleito MF para obter modelo de estudo e MA o modelo de trabalho.

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

Os Transferentes são utilizados no intuito de transferir o posicionamento dos implantes ou pilares protéticos, juntamente com o seu perfil de emergência gengival para o modelo, seja ele de estudo ou trabalho.

Rosqueie os transferentes sobre os implantes ou sobre os pilares, com a certeza de que as peças estejam com o seu correto travamento. O uso de uma tomada radiográfica se faz necessária para comprovação da correta adaptação.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

Os Transferentes são comercializados não estéreis, devendo o profissional esterilizá-lo e armazená-lo em local fresco e arejado. Os materiais de uso conjunto com os Transferentes, como chaves e moldeiras, deverão ser esterilizados em autoclaves devidamente auditadas e controladas periodicamente.

Para a colocação destes Transferentes, é recomendado que o profissional tenha conhecimento da especialidade e que elabore um plano de tratamento prévio, identificando assim, um implante e seus diâmetros.

Para evitar quaisquer alterações dimensionais, este produto não deve ser utilizado quando a embalagem estiver violada.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os Transferentes para implantes HE/HI/CM nos diâmetros que variam de 3.3 a 6.0 mm. Podem ser direto do implante ou sobre os pilares.

IMAGEM DO PRODUTO




TABELA DE CÓDIGO DAS FAMÍLIAS DO PRODUTO

A família deste produto pode ser identificada através dos dois primeiros dígitos do código do produto que serão:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
02	Transferentes de moldeira aberta
03	Transferentes de moldeira fechada

REF Código do REF

LOT Número do Lote

 Ler as Instruções

 Data de Fabricação

 Produto de Uso Único

 Evitar Exposição à Luz Solar



Manter Protegido de Produto Umidade



Cuidado - Frágil



Não Utilizar se Embalagem estiver violada!



Não Estéril



Prazo de Validade

WMA Microusinagem Médica e Odontológica Ltda
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 452 - CEP 02306-0001
São Paulo-SP - Brasil
Tels.: 55 11 2990.5533

www.microplant.com.br
microplant@microplant.com.br

Responsáveis Técnicos: Dr. Geraldo Paglia Jr - CRO 29379
Eng. Welmer Marçal Antunes - CREA 5062491951

